

TempoLok™ NE



CE 0482

091577/10.2009

Instruções de uso

Português

TempoLokNE é um cimento de mistura automática com base em óxido de zinco e isento de eugenol que é indicado para a fixação provisória de coroas, pontes, inlays e onlays e de todos os tipos de provisórios.

Indicação

Fixação temporária de coroas e pontes provisórias e permanentes, inlays e onlays.

Gestão do tempo

Tempo de trabalhabilidade à
temperatura ambiente

cerca de 1:00 minuto

Tempo de endurecimento na boca


4:00 - 5:00 minutos




Sistema de aplicação

TempoLokNE-Smartmix: ver Smartmix-System

Smartmix-System

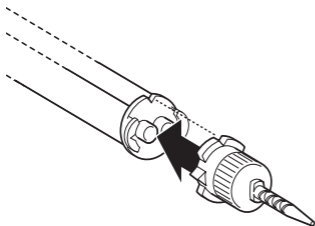


1. Rodar a tampa (4) do cartucho 90° ao contrário dos ponteiros do relógio e deitá-la fora.

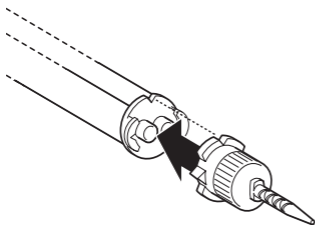

2. Aplicar novo Smartmix-Tip. Verifique se as reentrâncias na seringa correspondem às do tip.



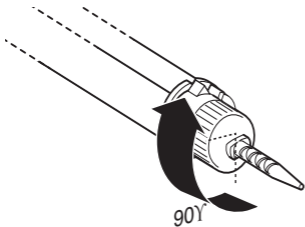

3. Fixe o tip rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio.
4. O material é misturado dentro da cânula durante a saída e pode ser aplicado diretamente.

Deixar a cânula usada no cartucho como fecho até ao uso seguinte!

Uso recomendado

1. Aplique TempoLokNE ao restauro temporário seco.
2. O mais tardar 60 segundos após o início da mistura fixe o provisório com uma leve pressão no dente preparado e seco.
3. Os excessos de cimento deixam-se remover facilmente com uma sonda depois do endurecimento. Tirar os excessos interdentários cuidadosamente com fio dental. Devido à sua cor clara o material distingue-se bem da substância dentária.

Efeitos secundários

Até ao momento não há conhecimento de efeitos secundários sistêmicos. Mas, de qualquer forma, não deverá usar o material se tiver conhecimento de uma alergia a um dos componentes ou, num caso raro, de uma alergia de contato.

Composição

Pasta catalisadora: Resinas naturais, ácidos gordos, aditivos

Pasta base: Óxido de zinco, parafina, aditivos



Armazenamento

Guardar somente à temperatura ambiente (18 - 25 °C)!

Não usar depois da expiração do prazo de validade.

Classificação

ISO 3107:1988 (devido à mistura automática verifica-se uma redução do tempo de endurecimento em relação à norma).

Formas comercializadas

Recarga

TempoLokNE-Smartmix

2 seringas duplas de Smartmix

de 11 g de pasta

20 Smartmix-Tips

REF 213127

Acessórios

50 Smartmix-Tips Short

REF 212040

Guardar fora do alcance das crianças! Somente para uso odontológico!

